

GEBRAUCHSANWEISUNG

#AOne Schaumstoff-Wundauflage

Für Schulungen, Support und Beratung kontaktieren Sie bitte Regen Medical unter 01793 575050 / customerservice@regenmedical.co.uk

Produktname: #AOne Schaumstoff-Wundauflage klebend / nicht klebend

Bestandteile: PU-Schaum, Polyacrylat, PU-Folie

Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um ein hydrophiles Polymer mit einer dreidimensionalen Schaumstruktur, die mit dem modernsten Polyurethan-Aufschäumverfahren verarbeitet wird. Es kann Wundexsudat wirksam absorbieren und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten.

Indikationen:

Die #AOne Schaumstoff-Wundauflage ist für die feuchte Wundheilung und das Exsudatmanagement bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden bestimmt:


1. Venöse Beingeschwüre
2. Druckgeschwüre
3. Diabetes-bedingte Fußgeschwüre
4. Wunden an Entnahmestellen
5. Abrasionswunden
6. Postoperative Inzisionen

Kontraindikationen :

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyacrylat oder Polyurethan.

Gebrauchsanweisung:

1. Reinigen Sie die Wunde vorschriftsmäßig und tupfen Sie die umliegende Haut vorsichtig trocken.
2. Wenn Sie einen Film, eine Creme, eine Salbe oder ein ähnliches Produkt verwenden, lassen Sie die Haut in der Nähe der Wunde trocknen, bevor Sie das Produkt auftragen.
3. Wählen Sie eine Wundauflage passender Größe (1-2 cm über den Rand der Wunde), um die Wunde entsprechend der Wundfläche abzudecken. Der Verband kann zugeschnitten werden, um ungünstige Bereiche wie die Fersen abzudecken.
4. Bei einer selbstklebenden Wundauflage entfernen Sie die oberste Schicht der Wundauflage und drücken den Kleberand fest an die Haut an.
5. Bei Verwendung der nicht klebenden Schaumstoff-Wundauflage ist ein zusätzlicher Verband erforderlich.
6. Dieses Produkt kann bis zu 7 Tage lang auf der Wunde verbleiben. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Menge des Exsudats ab. Wechseln Sie den Verband, wenn das Exsudat 2 cm vom Rand des Polsters entfernt ist.
7. Geeignet für die Verwendung im Rahmen einer Kompressionstherapie.
8. **Um den Klebeverband zu entfernen, rollen Sie eine Ecke so auf, dass Sie die Folie zwischen Finger und Daumen halten können. Dehnen Sie die Folie dann parallel zur Haut. Dadurch wird die Klebeschicht gelöst, und Sie können sie vorsichtig entfernen.**

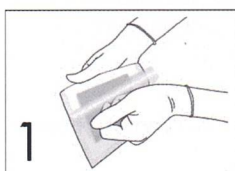

1
Wählen Sie nach dem Debridement eine Wundauflage in passender Größe.



2
Legen Sie die Wundauflage mit der weißen Seite direkt auf die Wunde auf.



3
Sichern Sie die Wundauflage mit einem geeigneten zusätzlichen Verband oder Tape.

Warnhinweise:

1. Kann nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals bei Patienten mit infizierten Wunden verwendet werden.
2. Im Falle auftretender Rötungen oder allergischer Symptome wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder das betreuende medizinische Fachpersonal.
3. Wenn die Wunde durch unzureichende Blutzufuhr oder ein diabetisches Fußgeschwür verursacht wurde, überprüfen Sie den Wundstatus bitte täglich, wenn das Produkt verwendet wird.
4. Bitte entfernen Sie das Produkt, bevor Sie eine Strahlenbehandlung einschließlich Röntgen, Ultraschalltherapie, Thermotherapie und Mikrowellentherapie durchführen.
5. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit Wasserstoffperoxid verwendet werden.
6. Dies ist ein Einwegprodukt zum einmaligen Gebrauch.
7. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Erklärung der Grafiken, Symbole und Abkürzungen auf dem Etikett:

Symbole	Erklärungen	Symbole	Erklärungen
	Nicht wiederverwenden		Sterilisationsverfahren: Ethylenoxid
	Verwendbar bis – Jahr und Monat		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Symbol für Temperaturbegrenzung (5-40 °C)		Hersteller
	Chargennummer		CE-Zeichen und Kennzeichnungsnummer der benannten Stelle
	Herstellungsdatum		Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Vorsicht		Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht resterilisieren		Steriles Barriersystem
	Medizinprodukt		Trocken halten

Lagerung und Entsorgung

#AOne Schaumstoff-Wundauflagen sind steril und einzeln verpackt. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bewahren Sie #AOne Schaumstoff-Wundauflagen an einem kühlen, trockenen Ort auf, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten. Die bevorzugte Lagertemperatur sollte zwischen 5°C und 35°C liegen. Die Entsorgung sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften erfolgen.

Herstellungsdatum: Siehe Innenbeutel. Lagerfähigkeit: 3 Jahre.
Dieses Produkt enthält keine FCKWs.

REGEN
Medical

VERTRIEB DURCH: Regen Medical Ltd, Unit 11, Interface Business Park, Bincknoll Lane, Royal Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8SY, UK

Hersteller: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland