

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflage

Für Schulungen, Support und Beratung kontaktieren Sie bitte Regen Medical unter 01793 575050 / [customerservice@regenmedical.co.uk](mailto:customerservice@regenmedical.co.uk)

Produktname(n): #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflage mit Rand und #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflage ohne Rand

#### Beschreibung

Die #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflage besteht aus einer silikonbeschichteten Wundkontaktschicht, einem superabsorbierenden Polster aus Polyurethanschaum und einer dampfdurchlässigen und wasserdichten Polyurethanfolie. Der dreilagige Aufbau erleichtert ein dynamisches Flüssigkeits-Management und schafft so ein optimal feuchtes Wundmilieu, das zu einem schnelleren Wundverschluss führt und dazu beitragen kann, das Mazerationsrisiko zu verringern. Die hautschonende Silikonschicht kann angehoben und neu positioniert werden, ohne dass sie ihre Haftfähigkeit verliert. Diese Schicht kann dazu beitragen, die Schmerzen der Patienten und mögliche Schäden an Wunden und der umgebenden Haut zu minimieren. Die saugfähige Polsterschicht sorgt für eine hervorragende Absorption und hält Exsudate zurück.

#### Indikationen

Die #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflage ist für ein breites Spektrum von Wunden indiziert, wie z. B.:

1. Druckgeschwüre
2. Geschwüre an Beinen und Füßen
3. Traumatische Wunden
4. Operationswunden
5. Hautentnahmestellen
6. Hautrisse
7. Verbrennungen (1. und 2. Grades)


Die Wundauflage kann auch bei trockenen/nekrotischen Wunden in Kombination mit Gelen verwendet werden.

#### Kontraindikationen

Sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder Überempfindlichkeit gegen die Wundauflage oder ihre Bestandteile angewendet werden.

#### Gebrauchsanweisung


1. Reinigen Sie die Wunde vorschriftsmäßig und tupfen Sie die umliegende Haut vorsichtig trocken.
2. Wenn Sie einen Film, eine Creme, eine Salbe oder ein ähnliches Produkt verwenden, lassen Sie die Haut in der Nähe der Wunde trocknen, bevor Sie das Produkt auftragen.
3. Wählen Sie einen Verband in der passenden Größe (der Verband sollte die trockene umgebende Haut um mindestens 1-2 cm bei den kleineren Größen und 5 cm bei den größeren Größen überlappen). DIE WUNDAUFLAGE NICHT SCHNEIDEN.
4. Entfernen Sie die Schutzfolien und kleben Sie die haftende Seite auf die Wunde. Dehnen Sie die Wundauflage nicht.
5. Bei der Verwendung einer randlosen Silikon-Schaumstoff-Wundauflage (Schritt 3) kann ein zusätzlicher Verband erforderlich sein.
6. Dieses Produkt kann bis zu 7 Tage lang auf der Haut verbleiben. Die Häufigkeit des Verbandswechsels hängt von der Menge des Exsudats ab. Wechseln Sie die Wundauflage, wenn das Exsudat 2 cm vom Rand des Polsters entfernt ist.

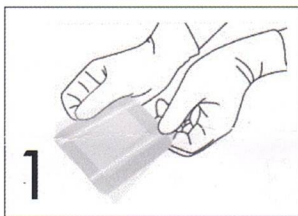

Wählen Sie nach dem Debridement eine Wundauflage in passender Größe



Legen Sie die Wundauflage mit der weißen Seite direkt auf die Wunde auf.

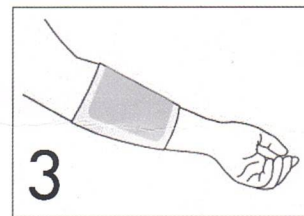

Sichern Sie die Wundauflage mit einem geeigneten zusätzlichen Verband.

#### Warnhinweise

1. Dieses Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht, wenn der Packungsbeutel beschädigt oder geöffnet ist.
2. Verwenden Sie die #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflage nicht zusammen mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid.
3. Bei Hautrötungen oder -sensibilisierungen brechen Sie die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
4. Ein einzelnes Produkt sollte nicht länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

## Erklärung der Grafiken, Symbole und Abkürzungen auf dem Etikett:

Symbole	Erklärungen	Symbole	Erklärungen
	Nicht wiederverwenden		Sterilisationsverfahren: Ethylenoxid
	Verwendbar bis – Jahr und Monat		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Symbol für Temperaturbegrenzung (5-40 °C)		Hersteller
	Chargennummer		CE-Zeichen und Kennzeichnungsnummer der benannten Stelle
	Herstellungsdatum		Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Vorsicht		Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht resterilisieren		Steriles Barriersystem
	Medizinprodukt		Trocken halten

### Lagerung und Entsorgung

#AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflagen sind steril und einzeln verpackt. Es sind verschiedene Größen erhältlich. Bewahren Sie #AOne Silikon-Schaumstoff-Wundauflagen an einem kühlen, trockenen Ort auf, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Die bevorzugte Lagertemperatur sollte zwischen 5°C und 35°C liegen.

Die Entsorgung sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften erfolgen.

Herstellungsdatum: Siehe Innenbeutel.

Lagerfähigkeit: 3 Jahre.

Dieses Produkt enthält keine FCKWs.

**REGEN**  
Medical

VERTRIEB DURCH: Regen Medical Ltd, Unit 11, Interface Business Park, Bincknoll Lane, Royal Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8SY



Hersteller: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany