

## Beschreibung

Die #AOne Gelierfaser-Wundauflage ist eine weiche, anpassungsfähige Vliesstoffauflage, die aus Hydrokolloidfasern und verstärkten Fasern besteht. Diese anpassungsfähige und stark absorbierende Wundauflage nimmt Wundexsudat auf und bildet ein weiches Gel, das ein feuchtes Milieu aufrechterhält und damit den Heilungsprozess des Körpers unterstützt, indem sie zur Entfernung unerwünschten Materials aus der Wunde (autolytisches Debridement) beiträgt, ohne neu gebildetes Gewebe zu beschädigen. Diese primäre Wundauflage sollte mit einem sekundären Deckverband verwendet werden.

## Indikationen

Die #AOne Gelierfaser-Wundauflage ist für die Versorgung von mäßig bis stark exsudierenden akuten oder chronischen Wunden indiziert. Sie kann auch zur effektiven Anwendung bei trockenen oder leicht nässenden Wunden vorbefeuchtet werden, einschließlich:

- Unterschenkelgeschwüren, Druckgeschwüren (stadium I/II/III) und diabetische Geschwüren
- Operationswunden (postoperative, Entnahmestellen, sekundär verheilte Wunden, dermatologische)
- Verbrennungswunden partieller Dicke
- Traumatische Wunden (Abschürfungen und Risswunden)
- Onkologische Wunden (wenn mäßig oder stark exsudierend, oberflächlich oder tief) • Schmerzhatte Wunden

## Kontraindikationen

Patienten mit einer Allergie gegen Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) sollten dieses Produkt nicht verwenden.

## Unerwünschte Reaktionen

Bei korrekter Anwendung wurden bisher keine unerwünschten Reaktionen gemeldet.

## Gebrauchsanweisung

1. Reinigen Sie den Wundbereich vor dem Auflegen der Wundauflage gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.
2. Legen Sie die Wundauflage auf die Wunde und bedecken Sie sie mit einer feuchtigkeitsspeichernden Auflage, z. B. einer Schaumstoff-Wundauflage, Mull oder einem anderen geeigneten Verband. Die #AOne Gelierfaser-Wundauflage sollte die wundumgebende Haut um 1,0 cm oder ½ Zoll überlappen.
3. Wenn Sie das #AOne Vlies in tiefen Wunden verwenden, füllen Sie tiefe Wunden nur zu 80%, da sich das Band bei Kontakt mit Wundflüssigkeit ausdehnt und den Wundraum ausfüllt.
4. Auf Hautentnahmestellen kann die #AOne Gelierfaser-Wundauflage bis zu 14 Tage lang auf der Wunde verbleiben.
5. Alle Wunden sollten häufig inspiziert werden. Entfernen Sie die #AOne Gelierfaser-Wundauflage, wenn dies klinisch angezeigt ist (z. B. bei Undichtigkeit, übermäßiger Blutung, Verdacht auf eine Infektion).
6. Die #AOne Gelierfaser-Wundauflage soll maximal 7 Tage lang an Ort und Stelle bleiben (außer bei Hautentnahmestellen). Die Wundauflage sollte gewechselt werden, wenn sie mit Wundexsudat gesättigt ist oder wenn der Abdeckverband undicht ist oder sich die Ränder des Abdeckverbandes bündeln oder einrollen.
7. Bei der Verwendung der #AOne Gelierfaser-Wundauflage auf Wunden mit geringerer Exsudatmenge befeuchten Sie sie vor dem Verbandswechsel mit steriler physiologischer Kochsalzlösung (0,9 %). Sämtliche Gelreste auf der Wunde sollten bei der Reinigung der Wunde entfernt werden. Vor allem tiefe Wunden sollten gut gespült werden.



1 Wählen Sie nach dem Debridement eine Wundauflage in passender Größe.



2 Legen Sie die Wundauflage mit einer beliebigen Seite direkt auf die Wunde auf.



3 Sichern Sie die Wundauflage mit einem geeigneten zusätzlichen Verband.

## Warnhinweise

Falls die Wunde länger als 48 Stunden nach der Anwendung einer #AOne Gelierfaser-Wundauflage anschwillt oder sich rötet, wenden Sie sich bitte an Ihr medizinisches Fachpersonal.

## Vorsicht

Dieses Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und wird steril geliefert.

Entsorgen Sie den nicht verwendeten Teil des Produkts nach der Versorgung der Wunde.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die innere Verpackung beschädigt ist.

## Lagerung und Entsorgung

#AOne Gelierfaser-Wundauflagen sind steril und einzeln verpackt.

Es sind verschiedene Größen erhältlich.

Bewahren Sie #AOne Gelierfaser-Wundauflagen an einem kühlen, trockenen Ort auf, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Die bevorzugte Lagertemperatur sollte zwischen 5° und 35° liegen.

Die Entsorgung sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften erfolgen.

**Steril:** Die #AOne Gelierfaser-Wundauflage wird in der Originalverpackung durch Elektronenbestrahlung sterilisiert.

**Herstellungsdatum:** Siehe Innenbeutel. **Lagerfähigkeit:** Fünf Jahre.

Dieses Produkt enthält keine FCKW.