

#AOne Superabsorbierende Wundauflage mit Folie  
#AOne Superabsorbierende Wundauflage ohne Folie  
#AOne Superabsorbierende Silikon-Wundauflage

### Produktbeschreibung

Die #AOne Superabsorbierende Wundauflage ist ein steriler Verband zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden, der aus einer luftdurchlässigen und wasserdichten Vliesstoffschicht, einer superabsorbierenden Polsterschicht und einer hydropenetrierenden Vliesstoffschicht besteht. Die dreilagige Konstruktion erleichtert das Flüssigkeitsmanagement und schafft ein optimales, feuchtes Wundmilieu, das zu einem schnelleren Wundverschluss führt. Das saugfähige Kissen bietet eine hervorragende Absorption und schließt Exsudate ein. Dadurch wird das Risiko einer Mazeration und einer Schädigung der Wundumgebung minimiert.

### Indikationen

Die #Aone Superabsorbierende Wundauflage ist indiziert für die Behandlung mäßig bis stark exsudierender Wunden

- einschließlich Beingeschwüren • Druckgeschwüren
- diabetischen Fußgeschwüren • dehiszierten chirurgischen Wunden

### Gegenindikationen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf trockenen oder gering exsudierenden Wunden, auf den Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen, da der Verband während der Absorption anschwillt. Verwenden Sie es nicht bei Verbrennungen dritten Grades.
2. Die #AOne Super absorbierende Wundauflage sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder Überempfindlichkeit gegen die Wundauflage oder ihre Bestandteile verwendet werden.

### Vorsicht

Nicht wiederverwenden. Verwenden Sie die Wundauflage nicht, wenn die sterilisierte Verpackung beschädigt oder geöffnet ist. Schneiden Sie die Wundauflage nicht, die Hülle muss intakt bleiben.

### Gebrauchsanweisung

1. Nach der Reinigung und Sterilisation der Wunde sollte eine Wundauflage in der geeigneten Größe gewählt werden, die ausreichend Platz zum Wundrand lässt. **DIE WUNDAUFLAGE NICHT SCHNEIDEN.**
2. Die #AOne Superabsorbierende Wundauflage kann sowohl als primäre als auch als zusätzliche Auflage verwendet werden.
3. Legen Sie die Wundauflage mit der weißen Seite auf die Wunde bzw. bei der klebenden Version mit der Silikonschicht auf die Wunde.
4. Bei der Verwendung als primäre Wundauflage muss die #AOne Superabsorbierende Wundauflage engem Kontakt mit dem Wundbett haben, damit die Absorption der Wundflüssigkeit gewährleistet ist. Sichern Sie den Wundauflage entsprechend mit Binden, Tapes oder Kompression.
5. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Menge des Exsudats ab.
6. Das Entfernen der Wundauflage kann durch Befeuchten mit Kochsalzlösung erleichtert werden.
7. Entsorgen Sie die Wundauflage als normalen Abfall. Sollte sie kontaminiert sein, befolgen Sie die örtlichen Vorschriften.



1 Wählen Sie nach dem Debridement eine Wundauflage in passender Größe



2 Legen Sie die Wundauflage mit der weißen Seite direkt auf die Wunde auf.



3 Sichern Sie die Wundauflage mit einem geeigneten zusätzlichen Verband.

**Herstellungsdatum:** Siehe Innenbeutel.

**Lagerfähigkeit:** 3 Jahre ab Herstellungsdatum.