

curea medical

Innovation with Care

curea

P1

DE

Beschreibung

Bei curea P1 handelt es sich um eine sterile, superabsorbierende Wundauflage. Die wundseitige Oberfläche besteht aus einem Polypropylenvlies, der Saugkörper besteht aus einem Zellstoffcomposite mit Flüssigkeitsspeichernden Superabsorbent. Auf der Rückseite befindet sich ein Vlies verbunden mit einer atmungsaktiven Folie, die eine zusätzliche Feuchtigkeit undurchlässige Barriere bildet.

Dadurch kann das curea P1 Sekret und Exsudat bei Aufrechterhaltung eines optimalen, feuchten Wundmilieus absorbieren. Die Flüssigkeiten werden im Inneren des Saugkerns gebunden, ohne zu tropfen oder auszulaufen. Die Wunde erhält eine längere Ruhephase zur Unterstützung der körpereigenen Wundheilungskräfte. curea P1 unterstützt ebenfalls die Wundgrundsäuberung. curea P1 absorbiert auch unter Druck.

curea P1 besitzt einen weichen Rand zur Vermeidung der Bildung von erneuten Dekubiti unter Druck. Es enthält keine pharmakologischen Wirkstoffe.

Indikation

- Chronische und stark exsudierende Wunden

Kontraindikation

- Trockene Wunden (Verklebungsgefahr).
- Keine Anwendung an Augen, Schleimhäuten oder Wundtaschen, da sich die Wundauflage bei Flüssigkeitsaufnahme ausdehnt.

Anwendung

Es ist sicherzustellen, dass die Anwendung von curea P1 unter ärztlicher Aufsicht und nach medizinischer Indikation erfolgt. Auch die Zeitabstände, nach denen curea P1 erneuert werden muss, legt der behandelnde Arzt fest. Die maximale Tragedauer ist auf 4 Tage beschränkt.

Es ist darauf zu achten, dass die nichtbedruckte Seite auf die Wunde aufgebracht wird. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, curea P1 auf der Haut zu fixieren.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Warnhinweise

- Die Wundauflage nicht zerschneiden.
- Nur zum Einmalgebrauch.
- Die Wundauflage kann im Hausmüll oder entsprechend der lokalen Vorschrift entsorgt werden.
- Sonderrichtlinien in medizinischen Einrichtungen für die Entsorgung (z.B. bei multiresistenten Erregern MRSA) sind zu berücksichtigen.

Sonstige Hinweise

Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder geöffnet ist.



Die Wundauflage ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht erneut verwenden, um mögliche Infektionsgefahr zu vermeiden.



Nicht erneut sterilisieren.



Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Temperaturgrenzen



Vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen (→ 60 %).

Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.

STERILE EO

curea medical

Innovation with Care

curea

P1 drain

DE

Beschreibung

Bei curea P1 drain handelt es sich um eine sterile, superabsorbierende Wundauflage. Die Oberfläche besteht aus einem Polypropylenvlies, der Saugkörper besteht aus einem Zellstoffcomposite mit Flüssigkeitsspeichernden Superabsorbent.

Dadurch kann das curea P1 drain Sekret und Exsudat bei Aufrechterhaltung eines optimalen, feuchten Wundmilieus absorbieren. Die Flüssigkeiten werden im Inneren des Saugkerns gebunden, ohne zu tropfen oder auszulaufen. Die Wunde erhält eine längere Ruhephase zur Unterstützung der körpereigenen Wundheilungskräfte. curea P1 drain unterstützt ebenfalls die Wundgrundsäuberung. curea P1 drain absorbiert auch unter Druck.

curea P1 drain besitzt einen weichen Rand zur Vermeidung der Bildung von erneuten Dekubiti unter Druck. Es enthält keine pharmakologischen Wirkstoffe.

Indikation

- Chronische und stark exsudierende Wunden

Kontraindikation

- Trockene Wunden (Verklebungsgefahr).
- Keine Anwendung an Augen, Schleimhäuten oder Wundtaschen, da sich die Wundauflage bei Flüssigkeitsaufnahme ausdehnt.

Anwendung

Es ist sicherzustellen, dass die Anwendung von curea P1 drain unter ärztlicher Aufsicht und nach medizinischer Indikation erfolgt. Auch die Zeitabstände, nach denen curea P1 drain erneuert werden muss, legt der behandelnde Arzt fest.

Die maximale Tragedauer ist auf 4 Tage beschränkt.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, curea P1 drain auf der Haut zu fixieren.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Warnhinweise

- Die Wundauflage nicht zerschneiden.
- Nur zum Einmalgebrauch.
- Die Wundauflage kann im Hausmüll oder entsprechend der lokalen Vorschrift entsorgt werden.
- Sonderrichtlinien in medizinischen Einrichtungen für die Entsorgung (z.B. bei multiresistenten Erregern MRSA) sind zu berücksichtigen.

Sonstige Hinweise

Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder geöffnet ist.



Die Wundauflage ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht erneut verwenden, um mögliche Infektionsgefahr zu vermeiden.



Nicht erneut sterilisieren.



Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Temperaturgrenzen



Vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen (>60 %)

Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.

STERILE EO

curea medical
Innovation with Care

curea
P2

DE

Beschreibung

curea P2 ist eine sterile, superabsorbierende Wundauflage. Die wundseitige Oberfläche besteht aus einem integrierten Wunddistanzgitter aus PE, der Saugkörper aus einem Zellstoffkern mit flüssigkeitsspeichernden Superabsorbent und die Rückseite aus atmungsaktivem und feuchtigkeitsundurchlässigem BTBS.

Dadurch kann curea P2 Sekret und Exsudat bei Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus absorbieren. Die Flüssigkeiten werden im Inneren des Saugkerns gebunden, ohne zu tropfen oder auszulaufen.

Das Wunddistanzgitter verhindert ein Verkleben der Wundauflage mit dem Regenerationsgewebe.

Die Wunde erhält eine längere Ruhephase zur Unterstützung der körpereigenen Wundheilungskräfte. curea P2 absorbiert auch unter Druck. curea P2 besitzt einen weichen Rand zur Vermeidung der Bildung von erneuten Dekubiti unter Druck. Es enthält keine pharmakologischen Wirkstoffe.

Indikation

Chronische und wenig bis stark exsudierende Wunden.

Kontraindikation

Trockene Wunden (Stagnation).

Keine Anwendung auf Schleimhäuten, Augen, Sehnen oder Knochen (Austrocknung).

Vorsicht bei Wundtaschen, da sich die Wundauflage bei Flüssigkeitsaufnahme ausdehnt.

Anwendung

Es ist sicherzustellen, dass die Anwendung von curea P2 unter ärztlicher Aufsicht und nach medizinischer Indikation erfolgt. Auch die Zeitabstände, nach denen curea P2 erneuert werden muss, legt der behandelnde Arzt fest. Die maximale Tragedauer ist auf 4 Tage beschränkt. Es ist darauf zu achten, dass die unbedruckte Seite auf die Wunde aufgebracht wird.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, curea P2 auf der Haut zu fixieren.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Warnhinweise

- Die Wundauflage nicht zerschneiden oder zerreißen.
- Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder geöffnet ist. Beschädigte und abgelieferte Produkte entsorgen.
- Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht erneut verwenden, um mögliche Infektionsrisiken zu vermeiden.
- Nicht erneut sterilisieren



Sonstige Hinweise

- Das Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.
- Latex-frei

STERILEEO

Lagerung

- Vor Feuchtigkeit schützen
- vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Temperaturgrenzen beachten.



Entsorgung

Die Wundauflage kann im normalen klinischen Abfall oder entsprechend der lokalen Vorschrift entsorgt werden. Sonderrichtlinien in medizinischen Einrichtungen für die Entsorgung (z.B. bei multiresistenten Erregern MRSA, VRE) sind zu berücksichtigen.



curea medical GmbH
Münsterstraße 61-65
48565 Steinfurt, Germany

CE 0044 Rev. 01/2011-06